

Název vyšetření: **RF – revmatoidní faktor**

Revmatoidní faktory jsou heterogenní skupina autoprotilátek, zaměřená proti antigenní determinantě na Fc fragmentu molekul IgG. Jsou důležité pro diagnostiku revmatoidní artritidy, ale jejich výskyt je prokázán i u jiných zánětlivě revmatoidních onemocnění a při různých nemocech. RF – stanovujeme imunoturbidimetricky na analyzátoru COBAS.

Zkratka:	RF, rev-sou		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.424	
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 5 ml	
Pokyny k odběru:	zkumavky s aktivátorem srážení nebo s gelem + aktivátorem srážení		
Četnost (odezva):	týdně	Zpracováno:	pátek
Transport:	co nejdříve do laboratoře při pokojové teplotě		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 14 dní.	Teplota: (-15) – (-25°C)	
Interference:	séra bakteriálně kontaminovaná, hemolytická nebo chylózní		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 91 501		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-19 - Sérologie RF turbidimetricky		
Jednotka:	IU/ml		
Poznámka:	Možnost vyšetření jako součást revmatoidního souboru (rev-sou) společně s RF a CRP.		

Referenční meze:

Referenční hodnota
< 14 IU/ml - negativní
> 14 IU/ml - pozitivní
Rozsah měření na analyzátoru 10 – 130 IU/ml