

Název vyšetření: **Mycoplasma pneumoniae - ELISA**

Vyšetření protilátek IgA, IgM, IgG proti Mycoplasma pneumoniae v lidském séru nebo plazmě metodou EIA.

Zkratka:	Myc EIA, res-sou		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.424	
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 5 ml	
Pokyny k odběru:	zkumavky s aktivátorem srážení nebo s gelem + aktivátorem srážení pro srážlivou krev		
Četnost (odezva):	týdně	Zpracováno:	středa
Transport:	co nejdříve do laboratoře při pokojové teplotě		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 7 dní	Teplota: 2 - 8°C	
Interference:	séra bakteriálně kontaminovaná, hemolytická, chylózní		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 82 079		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-178 Sérologie Mycoplasma pneumoniae (EIA)		
Jednotka:	IP		
Poznámka:	Sporné výsledky vyšetření doporučujeme konfirmovat blotem. Vyšetřujeme společně s Chlamydií a Bordetellou pertusae a parapertusae v respiračním souboru (res-sou)		

Referenční meze:

Protilátka	Referenční hodnota
IgA:	< 0,90 IP – negativní
	> 1,1 IP – pozitivní
IgM:	< 0,90 IP – negativní
	> 1,1 IP – pozitivní
IgG:	< 0,90 IP – negativní
	> 1,1 IP – pozitivní