

Název vyšetření: Calprotectin ve stolici

Zkratka	Calpro	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	stolice	Minimální množství: -
Pokyny k odběru:	odebíraná stolice nesmí přijít do kontaktu s vodou v toaletě ani s žádnými jinými biologickými či chemickými látkami, stolice, určená k odběru vzorku, se odebírá do čisté nádoby nebo na čistý odběrový papír, stolice se odebírá do speciálních odběrových zkumavek, z odběrové zkumavky, obsahující tyčinku k odběru, se odšroubuje víčko a vzorek stolice se odebere otočením tyčinky připojené k víčku na 3 různých místech vzorku stolice, je vhodný odběr z ranní stolice	
Četnost (odezva):	týdně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	6 dní
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 93223	Bod: 498
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-149	
Jednotka:	µg/g	
Poznámka:	speciální odběrové zkumavky jsou k dispozici v laboratoři, ke každé zkumavce je přikládán návod k použití zkumavky	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	< 50