

Název vyšetření: Bilirubin celkový

Zkratka	BiliC	Režim: Rutina/Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno, do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně/1 hod.	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25°C
Stabilita v laboratoři:	čas:	7 dní
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina statim	Výkon-kód: 81361 81121	Bod: 13 18
	SOP číslo: SOP-PLO-OKB-28	
Jednotka:	μmol/l	
Poznámka:	při transportu vzorky nevystavovat světlu	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 -1 den	0 – 150
žena/muž	0 – 2 den	0 – 193
žena/muž	0 – 3 den	0 – 217
žena/muž	4 – 6 den	0 – 216
žena/muž	1 – 12 měsíc	0 – 17
žena/muž	1 – 120 let	0 – 21