

Název vyšetření: Glukóza v žilní plazmě

Zkratka	GlukP	Režim: Rutina/Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	nesrážlivá krev	Minimální množství: 5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovetv obsahujících natrium fluorid a K ₂ EDTA, monovetvy mají žlutý uzávěr	
Četnost (odezva):	denně/1 hod.	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	72 hodin
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina statim	Výkon-kód: 81439 81155	Bod: 12 17
	SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-118
Jednotka:	mmol/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 1 den	2,22 – 3,33
žena/muž	2 – 28 dní	2,78 – 4,44
žena/muž	1 měsíc – 17 let	3,33 – 5,55
žena/muž	18 – 120 let	3,3 – 5,6