

Název vyšetření: Glukóza v kapilární plazmě

Zkratka	Glukap	Režim: Rutina/Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	kapilární krev	Minimální množství: 200 µl
Pokyny k odběru:	odběr provádíme na lačno, z bříška prstu do zkumavky microvette obsahující heparin + natrium fluorid, odebírá se 3 – 5 kapek krve, krev při odběru necháme volně vytékat, prsty nemačkáme!!!	
Četnost (odezva):	denně/1 hod	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	72 hodin
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, příměs extracelulární tekutiny vlivem mačkání prstu	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina statim	Výkon-kód: 81439 81155	Bod: 12 17
	SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-118
Jednotka:	mmol/l	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	3,3 – 5,59