

Název vyšetření: Ferritin

Zkratka	Ferrit	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	7 dní
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie, odběr na vyšetření by měl být proveden nejdříve 8 hod. po podání biotinu	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 93151	Bod: 199
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-12	
Jednotka:	ng/ml	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 -12 měsíců	13 – 327
žena/muž	1 – 3 roky	6 – 67
žena/muž	4 – 6 let	4 – 67
žena	7 – 12 let	7 – 84
muž	7 – 12 let	14 – 124
žena	13 – 17 let	13 – 68
muž	13 – 17 let	14 – 152
žena	18 – 60 let	15 – 150
muž	18 – 120 let	30 – 400
žena	61 – 120 let	30 – 400