

Název vyšetření: Etanol v moči

Zkratka	EtanoU	Režim: Rutina/Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	moč	Minimální množství: 10 ml
Pokyny k odběru:	Odebírá se střední proud moče, je důležité dodržovat zásady správného odběru moče, moč se odebírá do plastové zkumavky bez konzervantů, po odběru zkumavku dobře uzavřeme, aby nedošlo ke ztrátám vzniklým odpařováním	
Četnost (odezva):	denně/1 hod.	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	48 hod.
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	těkavé desinfekční prostředky	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina statim	Výkon-kód: 99151 99115	Bod: 431 661
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-99	
Jednotka:	g/l (promile)	
Poznámka:	Výsledek vyšetření je orientační a slouží pouze k e zdravotnickým účelům. Pro forenzní účely je nutno výsledek ověřit v akreditované toxikologické laboratoři. (Ústav soudního lékařství Brno).	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	hodnotí lékař