

Název vyšetření: human Choriogonadotropin

Zkratka	hCG	Režim: Rutina/Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	denně/1 hod.	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	3 dny
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie, vysoké dávky biotinu – odběr možný nejdříve po 8 hod. po poslední dávce	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina/statim	Výkon-kód: 93159	Bod: 149
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-15	
Jednotka:	mIU/ml	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	0 – 5