

## Název vyšetření: Hořčík

<b>Zkratka</b>	<b>Mg</b>	<b>Režim: Rutina/Statim</b>
<b>Pracoviště:</b>	CLA – biochemie	<b>Telefon: 419</b>
<b>Materiál:</b>	srážlivá krev	<b>Minimální množství: 7,5 ml</b>
<b>Pokyny k odběru:</b>	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
<b>Četnost (odezva):</b>	denně/1 hod.	
<b>Transport:</b>	<b>čas:</b>	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	<b>teplota:</b>	20 – 25 °C
<b>Stabilita laboratoři:</b>	<b>čas:</b>	7 dní
	<b>teplota:</b>	2 – 8 °C
<b>Interference:</b>	hemolýza, ikterita, lipemie	
<b>Vykazování pro pojišťovnu: rutina/statim</b>	<b>Výkon-kód:</b> 81465	<b>Bod:</b> 17
<b>SOP číslo:</b>	SOP-PLO-OKB-40	
<b>Jednotka:</b>	mmol/l	
<b>Poznámka:</b>		

### Referenční meze:

<b>Pohlaví</b>	<b>Věk</b>	<b>Referenční hodnota</b>
žena/muž	0 – 28 dní	0,62 – 0,91
žena/muž	1 – 12 .měsíců	0,7 – 0,95
žena/muž	1 – 12 let	0,7 – 0,86
žena/muž	13 – 17 let	0,7 – 0,91
žena/muž	18 – 120 let	0,66 – 1,07