

Název vyšetření: Hemoglobin ve stolici

Zkratka	FOB, HBstol	Režim: Rutina/Statim
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	stolice	Minimální množství:
Pokyny k odběru:	odebíraná stolice nesmí přijít do kontaktu s vodou v toaletě ani s žádnými jinými biologickými či chemickými látkami, stolice, určená k odběru vzorku, se odebírá do čisté nádoby nebo na čistý odběrový papír, stolice se odebírá do speciálních odběrových zkumavek, z odběrové zkumavky, obsahující tyčinku k odběru, se odšroubuje víčko a vzorek stolice se odebere otočením tyčinky připojené k víčku na 3 různých místech vzorku stolice, je vhodný odběr z ranní stolice, odběrovou zkumavku uchováváme v lednici	
Četnost (odezva):	týdně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 3 dnů. po odběru
	teplota:	2 – 8 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	7 dní
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 81733	Bod: 85
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-126	
Jednotka:	ng/ml	
Poznámka:	odběrovou zkumavku uchováváme před i po odběru v lednici při teplotě 2 – 8 °C!!!	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	<100