

Název vyšetření: Prolaktin

Zkratka	Prolak	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 7,5 ml
Pokyny k odběru:	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
Četnost (odezva):	2x týdně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	20 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	14 dní
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	hemolýza, ikterita, lipemie	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 93177	Bod: 142
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-62	
Jednotka:	ng/ml	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena	0 – 29 dní	0,3 – 95
muž	0 – 29 dní	3,7 – 81,2
žena	1 – 12 měsíců	0,2 – 29,9
muž	1 – 12 měsíců	0,3 – 28,9
žena	1 – 3 roky	1,0 – 17,1
muž	1 – 3 roky	2,3 – 13,2
žena	4 – 6 let	1,6 – 13,1
muž	4 – 6 let	0,8 – 16,9
žena	7 – 9 let	0,3 – 12,9
muž	7 – 9 let	1,9 – 11,6
žena	10 – 12 let	1,9 – 9,6
muž	10 – 12 let	0,9 – 12,9
žena	13 – 15 let	3,0 – 14,4
muž	13 – 15 let	1,6 – 16,6
žena	16 – 18 let	2,1 – 18,4
muž	16 – 18 let	2,7 – 15,2
žena	19 – 120 let	4,79 – 23,3
muž	19 – 120 let	4,04 – 15,2

