

Název vyšetření: Porfyriny v moči kvantitativně

Zkratka	PorfCO	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	moč sbíraná	Minimální množství: 10 ml
Pokyny k odběru:	sběr moče provádíme do tmavých plastových nádob bez konzervantů, moč během sběru musí být uchovávaná bez přístupu světla, z celkového množství nasbírané moče do laboratoře zaslat pouze odlitý vzorek (po důkladném promíchání), nádobu se sbíranou močí uchovávat v chladu a temnu, odlitý vzorek transportovat do laboratoře zabalený v alobalu	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po skončení sběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita v laboratoři:	čas:	1 týden
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:	světlo!!!	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 81581	Bod: 18
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-124	
Jednotka:	µg	
Poznámka:	do žádanky udat celkové množství nasbírané moče	

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 120 let	50 – 200