

Název vyšetření: Osmolalita moče

Zkratka	OsmU	Režim: Rutina
Pracoviště:	CLA – biochemie	Telefon: 419
Materiál:	moč	Minimální množství: 10 ml
Pokyny k odběru:	odebírání se střední proud první ranní moče, je důležité dodržovat zásady správného odběru moče, moč odebíráme do plastové zkumavky (bez úprav) bez použití konzervantů	
Četnost (odezva):	denně	
Transport:	čas:	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	teplota:	18 – 25 °C
Stabilita laboratoři:	čas:	2 dny
	teplota:	2 – 8 °C
Interference:		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 81563	Bod: 6
SOP číslo:	SOP-PLO-OKB-119	
Jednotka:	mmol/kg	
Poznámka:		

Referenční meze:

Pohlaví	Věk	Referenční hodnota
žena/muž	0 – 6 měsíců	375 – 550
žena/muž	7 – 12 měsíců	600 – 1160
žena/muž	1 – 120 let	50 – 1400