

## Název vyšetření: Železo

<b>Zkratka</b>	<b>Fe</b>	<b>Režim: Rutina</b>
<b>Pracoviště:</b>	CLA – biochemie	<b>Telefon: 419</b>
<b>Materiál:</b>	srážlivá krev	<b>Minimální množství: 7,5 ml</b>
<b>Pokyny k odběru:</b>	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
<b>Četnost (odezva):</b>	denně	
<b>Transport:</b>	<b>čas:</b>	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	<b>teplota:</b>	20 – 25 °C
<b>Stabilita v laboratoři:</b>	<b>čas:</b>	3 týdny
	<b>teplota:</b>	2 – 8 °C
<b>Interference:</b>	hemolýza, ikterita, lipemie	
<b>Vykazování pro pojišťovnu: rutina</b>	<b>Výkon-kód:</b> 81641	<b>Bod:</b> 16
<b>SOP číslo:</b>	SOP-PLO-OKB-37	
<b>Jednotka:</b>	μmol/l	
<b>Poznámka:</b>		

### Referenční meze:

<b>Pohlaví</b>	<b>Věk</b>	<b>Referenční hodnota</b>
žena	0 – 30 dní	5,2 – 22,7
muž	0 – 30 dní	5,7 – 20,0
žena	1 – 12 měsíců	4,5 – 22,6
muž	1 – 12 měsíců	4,8 – 19,5
žena	1 – 3 roky	4,5 – 18,1
muž	1 – 3 roky	5,2 – 16,3
žena	4 – 6 let	5,0 – 16,7
muž	4 – 6 let	4,5 – 20,6
žena	7 – 9 let	5,4 – 18,6
muž	7 – 9 let	4,8 – 17,2
žena	10 – 12 let	5,7 – 18,6
muž	10 – 12 let	5,0 – 20,0
žena	13 – 15 let	5,4 – 19,5
muž	13 – 15 let	4,7 – 19,7
žena	16 – 18 let	5,9 – 18,3
muž	16 – 18 let	4,8 – 24,7
žena	19 – 120 let	6,6 – 26,0
muž	19 – 120 let	11,0 – 28,0