

Parazitologické vyšetření na enterobiózu

Mikroskopické vyšetření perianálního otisku na přítomnost vajíček nebo červů roupa dětského (*Enterobius vermicularis*).

Zkratka:	Lepex – perianální otisk (lepex)		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.541	
Materiál:	perianální otisk		
Odběrová souprava:	podložní sklo + průhledná lepicí páska (izolepa)		
Pokyny k odběru:	Odběr vzorku ráno před omytím. Průhledná lepicí páska se otiskne na okolí análního otvoru a poté se nalepí rovně na podložní sklo.		
Četnost (odezva):	negat. výsledek - 2 dny pozit. výsledek – 2 dny	Zpracováno:	denně
Transport:	2 hod. pokojová teplota, 24 hod. pokojová teplota		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 48 hod.	Teplota: chladničková teplota	
Vykazování pro pojišťovnu:	Výkon-kód základní: 84 019		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-113 – Vyšetření na enterobiózu		
Indikace:	Podezření na infekci roupy (Enterobius vermicularis).		
Interpretace:	Jako pozitivní se hodnotí vzorek s nálezem vajíček nebo červa parazita.		
Poznámka:	Ke zvýšení záchytnosti se doporučuje odebrat v různé dny alespoň 3 vzorky.		