

## Leukocyty (KO, KODIF)

Vyšetřením krevního obrazu zjistíme hodnoty leukocytární, erytrocytární a trombocytární řady. Odchytky v krevním obraze bývají u hematologických, hematoonkologických onemocnění a celé řady dalších chorob.

|                                                  |                                                                                                     |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Zkratka:</b>                                  | <b>WBC</b>                                                                                          |                                                           |
| <b>Pracoviště:</b>                               | hematologie                                                                                         | <b>Telefon:</b> 568 809 342                               |
| <b>Biologický materiál:</b>                      | venózní krev (krev)                                                                                 |                                                           |
| <b>Odběrová zkumavka:</b>                        | plná nesrážlivá krev (EDTA)                                                                         | <b>Doporučené množství:</b><br>1 zkumavka přesně odebraná |
| <b>Četnost (odezva):</b>                         | Statim 1 hodina, rutina 2 hodiny.                                                                   |                                                           |
| <b>Transport:</b>                                | Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při 15 až +25 °C.                                              |                                                           |
| <b>Stabilita vzorku:</b>                         | 5 hodin při 15 až 25 °C.                                                                            |                                                           |
| <b>Interference:</b>                             | viz KO, KODIF                                                                                       |                                                           |
| <b>Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim</b> | <b>Výkon – kód:</b><br>viz KO, KODIF                                                                | <b>Bod:</b><br>viz KO, KODIF                              |
| <b>SOP číslo – název:</b>                        | SOP-PLO-HEM-07 (69) Vyšetření KO + 5 populačního rozpočtu leukocytů na analyzátoru XN 550 (XN 1000) |                                                           |
| <b>Jednotka:</b>                                 | .10 <sup>9</sup> /l                                                                                 |                                                           |
| <b>Poznámka:</b>                                 | viz KO, KODIF                                                                                       |                                                           |

### Referenční meze:

| Věk           | Referenční hodnota |
|---------------|--------------------|
| 0 – 1 den     | 9,0 – 34,0         |
| 2 – 7 dní     | 5,0 – 21,0         |
| 8 – 14 dní    | 5,0 – 20,0         |
| 15 – 180 dní  | 5,0 – 19,5         |
| 181 – 365 dní | 6,0 – 17,5         |
| 1 – 2 roky    | 6,0 – 17,5         |
| 2 – 4 roky    | 5,5 – 17,0         |
| 6 – 8 let     | 4,5 – 14,5         |
| 8 – 15 let    | 4,5 – 13,5         |
| >15 let       | 4,0 – 10,0         |