

Krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů

Vyšetřením krevního obrazu zjistíme hodnoty leukocytární, erytrocytární a trombocytární řady. Odchylky v krevním obrazu bývají u hematologických, hematoonkologických onemocnění a celé řady dalších chorob.

Zkratka:	KODIF	
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 342
Biologický materiál:	venózní krev (krev)	
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (EDTA)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná
Četnost (odezva):	Statim 1 hodina, rutina 2 hodiny.	
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při 15 až +25 °C.	
Stabilita vzorku:	5 hodin při 15 až 25 °C.	
Interference:	<p>Leukocyty – shluky trombocytů, leukocytů, erytrocytů (chladový aglutinin) kryoglobulin, kryoprotein, fibrin, megakaryocyty, chylémie, erytroblasty, nedostatečná hemolýza.</p> <p>Erytrocyty – vysoký počet leukocytů, gigantické trombocyty, shlukování erytrocytů (chladový aglutinin), mikrocyty, fragmenty červených krvinek.</p> <p>Hemoglobin – vysoký počet leukocytů, lipémie, abnormální proteiny.</p> <p>Hematokrit – shlukování erytrocytů (chladový aglutinin), mikrocyty, fragmenty červených krvinek, leukocytóza, těžký diabetes, urémie, sférocytóza.</p> <p>Trombocyty – shluky trombocytů, gigantické trombocyty, pseudotrombocytopenie, fragmenty bílých krvinek, malé erytrocyty, fragmenty erytrocytů, kryoglobulin, kryoprotein.</p>	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim	Výkon – kód: 96 167 KODIF	Bod: 65
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-07 (69) Vyšetření KO + 5 populačního rozpočtu leukocytů na analyzátoru XN 550 (XN 1000)	
Jednotka:		
Poznámka:	<p>Omezení: Vzorek nelze přjmout, je-li: sražený, chybějící uzavřená zkumavka, množství z venózního odběru pod 1 ml, u kapilárního odběru pod 0,25 ml, odběr je proveden do nevhodného media, není dodržen obecně platný předpis pro příjem materiálu.</p> <p>Jednotlivé parametry KODIF s referenčními intervaly jsou uvedeny u konkrétního parametru.</p>	