

Diferenciální rozpočet leukocytů mikroskopicky

Vyšetření slouží k rozpoznání jednotlivých druhů krvinek, jejich morfologie a patologie.

Zkratka:	DIFMAN		
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 342	
Biologický materiál:	venózní krev (krev)		
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (EDTA)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná	
Četnost (odezva):	Rutina 2 hodiny, statim 1 hodina.		
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při 15 až +25 °C.		
Stabilita vzorku:	5 hodin při 15 až 25 °C.		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim	Výkon – kód: 96 713 provedení krevního nátěru 96 711 panoptické barvení krevního nátěru 96 315 analýza krevního nátěru		Bod: 12 24 25
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-03 Panoptické barvení a morfologické hodnocení nátěrů periferní krve		
Jednotka:	%		
Poznámka:	Omezení: Vzorek nelze přijmout, je-li: sražený, chybně uzavřená zkumavka, množství z venózního odběru pod 1 ml, u kapilárního odběru pod 0,25 ml, odběr je proveden do nevhodného media, není dodržen obecně platný předpis pro příjem materiálu.		

Referenční meze:

Věk	neutrofily	lymfocyty	monocyty	eosinofily	bazofily
0 – 1 den	51,0 – 71,0	16,0 – 41,0	1,0 – 10,0	0,0 – 4,0	0,0 – 2,0
2 – 7 dní	35,0 – 55,0	31,0 – 51,0	3,0 – 15,0	0,0 – 8,0	0,0 – 2,0
8 – 14 dní	30,0 – 50,0	38,0 – 58,0	3,0 – 15,0	0,0 – 7,0	0,0 – 2,0
15 – 30 dní	25,0 – 45,0	46,0 – 66,0	1,0 – 13,0	0,0 – 7,0	0,0 – 2,0
31 – 180 dní	22,0 – 45,0	46,0 – 71,0	1,0 – 13,0	0,0 – 7,0	0,0 – 2,0
181 – 365 dní	21,0 – 42,0	51,0 – 71,0	1,0 – 9,0	0,0 – 7,0	0,0 – 2,0
1 – 2 roky	21,0 – 43,0	49,0 – 71,0	1,0 – 9,0	0,0 – 7,0	0,0 – 2,0
2 – 4 roky	23,0 – 52,0	40,0 – 69,0	1,0 – 9,0	0,0 – 7,0	0,0 – 2,0
4 – 6 let	32,0 – 61,0	32,0 – 60,0	1,0 – 9,0	0,0 – 7,0	0,0 – 2,0
6 – 8 let	41,0 – 63,0	29,0 – 52,0	0,0 – 9,0	0,0 – 7,0	0,0 – 2,0
8 – 10 let	43,0 – 64,0	28,0 – 49,0	0,0 – 8,0	0,0 – 4,0	0,0 – 2,0
10 – 15 let	44,0 – 67,0	25,0 – 48,0	0,0 – 9,0	0,0 – 7,0	0,0 – 2,0
>15 let	47,0 – 70,0	20,0 – 45,0	2,0 – 10,0	0,0 – 5,0	0,0 – 1,0