

Coombsův test

Slouží k testování přítomnosti protilátek proti erytrocytům. Skládá se z přímého a nepřímého Coombsova testu (přímý a nepřímý antiglobulinový test).

Zkratka:	COOMT	
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 339
Biologický materiál:	venózní krev	
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (citrát sodný)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná
Četnost (odezva):	Statim 1 hodina, rutina max. 7 dní.	
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při 15 až +25 °C.	
Stabilita vzorku:	7 dní při 2 až 8 °C.	
Interference:	Podávání imunosupresiv, chemoterapie, podávání cytostatik.	
Vykazování pro pojišťovnu: statim, rutina	Výkon – kód: 97 111 separace séra nebo plasmy 22 212 screening antierytrocytárních protilátek statim 22 214 screening antierytrocytárních protilátek v sérii 22 133 přímý Coombsův test kvalitativně	Bod: 17 313 137 114
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-63 Stanovení antierytrocytárních protilátek – nepřímý antiglobulinový test a bromelinový test na ID Diamed SOP-PLO-HEM-25 Přímý Coombsův test kvalitativně	
Jednotka:		
Poznámka:	Omezení: jsou-li viditelné známky hemolýzy, chylózní plasma nebo sérum, nesprávně nebo neúplně označený vzorek, chybně uzavřená zkumavka, množství z venózního odběru pod 2,5 ml, odběr je proveden do nevhodného média, není dodržen obecně platný předpis pro příjem materiálu.	